



採血管のラベルを貼る時に

アマノ病院 中央検査室

標準的なラベルの貼り方 その1



- ①検査機械のスキャナーレンジは概ね緑枠です。バーコードの両端が直線で枠内に収まるようにラベルを貼ってください
- ②ラベルの上下位置は試験管上端から1cm程度を目安にしてください

標準的なラベルの貼り方 その2



- ③この貼り方も標準的です。ただしラベル文字をよく見ると 逆立ちですね

機械が読めないラベルの貼り方 その1



- ①検査機械のスキャナーレンジを逸脱しています。ラベルを貼り直す必要があります

機械が読めないラベルの貼り方 その2



- ①検査機械のスキャナーレンジを逸脱しています。ラベルを貼り直す必要があります

機械が読めないラベルの貼り方 その3



- ①検査機械のスキャナーレンジを逸脱している可能性が高く、ラベルを貼り直す必要があります

技師が困るラベルの貼り方



- ①スキャナーレンジを逸脱している可能性以上に、
- ④ラベル位置が高すぎて開栓できません。ラベルを貼り直す必要があります

機械が読めないラベルの貼り方 その4



- ⑤重ね張りの結果、バーコードが一部隠れています。ラベルを貼り直す必要があります

機械が読めないラベルの貼り方 その5



- ラベルにシワがあります
- ラベルを貼り直す必要があります